

Incides® N

Desinfectie-tissues op basis van alcohol



Toepassing

- Zeer snelle werking;
- Gebruiksklaar;
- Aangename geur;
- Snelle droging.

Productinformatie

Kenmerken

- Werkzaam tegen bacteriën schimmels en virussen: inclusief TBC, hepatitis B-HIV- en rotavirussen.
- Aldehydevrij.
- Korte inwerktijd.
- Gebruiksklare tissues.
- Uitgebalanceerde formule van verschillende actieve stoffen.
- Aangenaam geparfumeerd.
- Verkrijgbaar in navulverpakkingen.
- Dermatologisch getest.
- Uitgebreid getest op materiaal. Compatibiliteit.

Uw voordeel

- Hoge desinfectie zekerheid op alle alcoholbestendige oppervlakken.
- Gebruiksvriendelijk.
- Snelle zekerheid voor patiënt en gebruiker.
- Handig in gebruik.
- Alcoholen verzekeren een snelle, streeploze opdroging.
- Aangename werkomstandigheden.
- Weinig verpakingsafval.
- Gebruikersvriendelijk.
- Kan worden gebruikt op metaal, plastic en alcoholbestendige geverniste oppervlakken b.v. klinisch meubilair.

Gebruiksaanwijzing

Neem 1 tissue per keer en desinfecteer het oppervlak. Niet nawissen. Snelle desinfectie volgens DGHM: 1 min.
Niet naspoelen. Bus sluiten na gebruik.

Microbiologische en virologische resultaten

	Inwerktijd
Oppervlakkendesinfectie volgens Medical Devices Directive in Ziekenhuizen en medische praktijken (DGHM)	5 min.
Snelle desinfectie conform DGHM	1 min.
Doeltreffend tegen HBV (incl. HIV)	2,5 min.
Doeltreffend tegen TBC	5 min.
Doeltreffend tegen:	
- het vacciniavirus (Elstree)	5 min.
- het adenovirus (adenoid 6)	5 min.
- het papovavirus SV 40 (777)	10 min.
Doeltreffend tegen: het Rota-virus	1 min.

Verpakking Incides® N

- 6 x bus à 90 doekjes
- 5 x navulling à 90 doekjes
- 1 bus en 2 x navulling

Attesten: Uitgebreid getest: zowel microbiologisch, virologisch, toxicologisch als ecologisch. Deze testresultaten zitten allemaal in een uitgebreid productdossier. Op verzoek verkrijgbaar evenals het veiligheidsinformatieblad.

Samenstelling: 100 g vloeistof bevat 35 g 2-Propanol, 25g 1-Propanol

Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product